

# Konzept

## "Notfallsichere"

## Praxis



Nomeditec Notfallmedizintechnik, 99094 Erfurt, Waidpfad 20, Phone : 01728221518,

Mail : [info@powermedpoint.com](mailto:info@powermedpoint.com), Web : [www.notfallseminar.de](http://www.notfallseminar.de),

Fax : 0361-2445023

# Machen Sie Ihre Praxis "notfallsicher"

Unser integriertes Notfallschulungskonzept beschreibt die perfekte Symbiose von Notfallequipment und Schulung, speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Arztpraxis.

Ihr neues Equipment wiegt weniger als Ihr Wochenendeinkauf, alles ist übersichtlich und auf einen Blick zu finden. Mit der speziellen Packtechnik brauchen Sie nur noch entsprechend der logisch vorgegebenen Reihenfolge vorzugehen .

Mit unserem innovativen wie simplen Schulungskonzept erhalten Sie einen fertigen Plan, um bis zum Eintreffen des Notarztes jeden Notfall sicher und fast streßfrei über die Zeit zu bringen.

Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges Simulationstraining mit einem einzigartigen ultramobilen Notfallequipment.

Ihr Powermedpoint-Seminarteam



**Powermedpoint Notfallweiterbildungen**

**Waidpfad 20**

**99094 Erfurt**

Telefon : 0172/8221518

Mail :

[info@powermedpoint.com](mailto:info@powermedpoint.com)



Nomeditec Notfallmedizintechnik, 99094 Erfurt, Waidpfad 20, Phone : 01728221518,

Mail : [info@powermedpoint.com](mailto:info@powermedpoint.com), Web : [www.notfallseminar.de](http://www.notfallseminar.de),

**Fax : 0361-2445023**

**Ein Konzept für jeden Notfall**  
**Wissenschaft - Training - Equipment**  
**alles aus einer Hand – perfekt abgestimmt**  
**100 % QM mit jährlichem Auffrischkurs**

**Basismodul Grundpreis : 499,00 Euro zzgl. MwSt.\***

incl. 3 Stunden Notfalltraining in Ihrer Praxis entspr. Modul A

incl. Notfalltasche fertig gefüllt NOM-NT499

incl. kostenlose Teilnahme Zweitpraxis

incl. Anfahrt Zentralthüringen

Aufpreise : für Anfahrt und Zeitpauschale

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| restl. Thüringen                | + 50,00 Euro netto  |
| Sachsen-Anhalt-Süd              | + 50,00 Euro netto  |
| Hessen, Sachsen-Anhalt, Sachsen | + 100,00 Euro netto |
| Restl. Deutschland              | + 200,00 Euro netto |

\* Bei Ausstellung eines Sprechstundenbedarfsrezeptes für Sauerstofffüllung 66l, sonst zzgl. 59,00 Euro netto zum Basispreis

**Erweiterungsmodul Fred - Easyport**      perfekt passend zur Tasche NOM-NT499

**Lieferumfang:**

Defibrillator  
Elektroden  
Tasche  
- Bedienungsanleitung

**+ 1499,00 Euro netto\*\***



halbautomatischer Defibrillator mit Monitor von Schiller mit Multipulse Biowave für die breite Öffentlichkeit. Ein Meisterwerk schweizerischer Präzisionskunst.

Der erste Taschen-Defi der Welt.  
Der neue externe Defibrillator, der so klein und leicht ist, dass er in jede Manteltasche und in jeden Arztkoffer passt und trotzdem alle Anforderungen eines modernen AEDs erfüllt und übertrifft

Preis nur in Verbindung im Paket mit Notfallsimulationstraining und Modultasche NOM-NT499 sowie dem Einweisungsseminar, siehe Preisliste oben

Nomeditec Notfallmedizintechnik, 99094 Erfurt, Waidpfad 20, Phone : 01728221518,

Mail : [info@powermedpoint.com](mailto:info@powermedpoint.com), Web : [www.notfallseminar.de](http://www.notfallseminar.de),

Fax : 0361-2445023

| Bestandsliste Notfalltasche                 |    | Verfallsdatum | STK, Eichung, etc.  |
|---|----|---------------|---------------------|
| Guedeltuben                                 | 4  |               |                     |
| Magillzange                                 | 1  |               |                     |
| Beißkeil                                    | 1  |               |                     |
| Handschuhe                                  | 8  |               |                     |
| Pulsoximeter                                | 1  |               | alle 2 Jahre        |
| Kleiderschere                               | 1  |               |                     |
| Larynxtubus Gr. 4                           | 1  |               |                     |
| Larynxtubus Gr. 5                           | 1  |               |                     |
| Blockerspritze f. Larynxtubus               | 1  |               |                     |
| Pocketbeatmungsmaske mit<br>Bakterienfilter | 1  |               | Filter austauschbar |
| Bakterienfilter                             | 1  |               |                     |
| Beatmungsbeutel                             | 1  |               | Einwegprodukt       |
| Maske Gr. 3                                 | 1  |               |                     |
| Maske Gr4. 5                                | 1  |               |                     |
| Sauerstoffschlauch                          | 1  |               |                     |
| HWS-Stütze, verstellbar                     | 1  |               |                     |
| Sauerstoff-Einweg 66 l                      | 1  |               | Einwegprodukt,SSB   |
| Sauerstoffmaske                             | 1  |               |                     |
| Verneblermaske                              | 1  |               |                     |
| RR-Meßgerät                                 | 1  |               | alle 2 Jahre        |
| Stethoskop, Flachkopf                       | 1  |               |                     |
| Diagnostikleuchte                           | 1  |               |                     |
| Reflexhammer                                | 1  |               |                     |
| Blutzuckermeßgerät                          | 1  |               |                     |
| Thermometer ( Ohr- )                        | 1  |               | alle 2 Jahre        |
| Schaumstoffgepolsterte Aluschiene           | 1  |               |                     |
| Kanülensammelbehälter                       | 1  |               |                     |
| Kompakter Notfallratgeber                   | 1  |               |                     |
| Spritzen 10 ml                              | 8  |               |                     |
| Kanülen grün und grau                       | 10 |               |                     |
| Nasalapplikator                             | 1  |               | Einwegprodukt       |
| Zellstofftupfer                             | 20 |               |                     |
| Venenstauer                                 | 1  |               |                     |
| Ampullarium leer                            | 1  |               |                     |
| Pflasterrolle schmal                        | 1  |               |                     |
| Octenisept Hautdesinfektion                 | 1  |               |                     |
| Venenverweilkanülen rosa                    | 3  |               |                     |
| Fixierpflaster für Venenverweilkanülen      | 3  |               |                     |
| NaCL 500 ml in Kunststoffflasche            | 1  |               |                     |
| NaCl 250 ml in Kunststoffflasche            | 1  |               |                     |
| Infusionssystem                             | 1  |               |                     |
| Mini-Syke-Entnahmesystem                    | 1  |               |                     |
| Kpl. KfZ-Verbandset                         | 1  |               |                     |
| Hygienekittel                               | 1  |               |                     |
| Infektionsschutzmaske FFP 3                 | 1  |               |                     |
| Sekret/Müllbeutel                           | 3  |               |                     |
| Hyperventilationsmaske                      | 1  |               |                     |
| Kühlkompressen                              | 1  |               |                     |
| Pinzette Einweg                             | 1  |               |                     |
| Chir. Skalpell Einweg                       | 1  |               |                     |
| Tasche Cordura rot                          | 1  |               |                     |

# Bestellschein für Komplettpaket

|                                   |         |                  |  |
|-----------------------------------|---------|------------------|--|
| Basismodul Schulung und Equipment | 499,00  | Euro zzgl. MwSt. |  |
| Anfahrtspauschale ( siehe oben )  |         | Euro zzgl. MwSt. |  |
| Nur Notfalltasche NOM –NT 499     | 399,00  | Euro zzgl. MwSt. |  |
| Fred-Easyport AED                 | 1499,00 | Euro zzgl. MwSt. |  |
| Auffrischungstraining einfach     | 300,00  | Euro zzgl. MwSt. |  |
|                                   |         |                  |  |
|                                   |         |                  |  |
| Gesamt zu zahlen :                |         |                  |  |

Nomeditec Notfallmedizintechnik,  
 99094 Erfurt, Waidpfad 20, Phone :  
 01728221518, Mail :  
 info@powermedpoint.com, Web :  
 www.notfallseminar.de,

**Fax : 0361-2445023**

Praxisstempel :

## Preisliste Einzelprodukte

|  | Preis, zzgl. MwSt. | Anzahl |
|--|--------------------|--------|
| <b>Pulsoximeter</b>                            | <b>75,00 Euro</b>  |        |
| <b>Larynxtubus – Set Gr. 4 und 5 + Spritze</b> | <b>24,00 Euro</b>  |        |
| <b>Pocketbeatmungsmaske mit Filter</b>         | <b>8,50 Euro</b>   |        |
| Bakterienfilter                                | 2,50 Euro          |        |
| Beatmungsbeutel m. Maske                       | 45,00 Euro         |        |
| HWS-Stütze, verstellbar                        | 20,00 Euro         |        |
| <b>Sauerstoff-Einweg 66 l</b>                  | <b>59,00 Euro</b>  |        |
| Sauerstoffmaske                                | 2,90 Euro          |        |
| Verneblermaske                                 | 3,50 Euro          |        |
| RR-Meßgerät                                    | 22,00 Euro         |        |
| Stethoskop, Flachkopf                          | 4,50 Euro          |        |
| Thermometer ( Ohr- )                           | 45,00 Euro         |        |
| Schaumstoffgepolsterte Aluschiene              | 10,00 Euro         |        |
| <b>Kompakter Notfallratgeber</b>               | <b>17,50 Euro</b>  |        |
| <b>Nasalapplikator</b>                         | <b>9,50 Euro</b>   |        |
| Ampullarium leer                               | 22,00 Euro         |        |
| Venenverweilkanülen rosa                       | je. 1,50 Euro      |        |
| Mini-Spyke-Entnahmesystem                      | 0,80 Euro          |        |
| Hygienekittel                                  | 4,50 Euro          |        |
| Infektionsschutzmaske FFP 3                    | 3,00 Euro          |        |
| Sekret/Müllbeutel                              | je.0,80 Euro       |        |
| Tasche Cordura rot                             | 59,00 Euro         |        |

Praxisstempel :

Preise netto zzgl. Porto 6,00 Euro

Nomeditec Notfallmedizintechnik,  
99094 Erfurt, Waidpfad 20, Phone :  
01728221518, Mail :  
info@powermedpoint.com, Web :  
www.notfallseminar.de,

**Fax : 0361-2445023**

Nomeditec Notfallmedizintechnik, 99094 Erfurt, Waidpfad 20, Phone : 01728221518,

Mail : info@powermedpoint.com, Web : www.notfallseminar.de,

**Fax : 0361-2445023**

# Qualitätsmanagement

## Machen Sie Ihre Praxis NOTFALLSICHER !

Wir empfehlen Ihnen ein jährliches Notfalltraining in der Praxis. Über unseren Partner Powermedpoint Notfallweiterbildungen lassen wir Sie gern verführen in die Welt der Notfallsimulation.

Buchen Sie jährlich den 3 Stundenkurs. Notfallsimulation in der Arztpraxis und trainieren Sie mit Ihrem Team und einer Übungstasche , die der Ihren identisch ist.

Als besondere Leistung erhalten Sie einen Funktions-check Ihrer Tasche, wir kontrollieren Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit Ihrer Ausrüstung, es erfolgt der kpl. Austausch der Verbrauchsmaterialien und Batterien, so dass auch im nächsten Jahr die Tasche immer einsatzbereit ist. Im Zweiten Jahr nach Anschaffung erfolgt sogar der Austausch des Blutdruckmeßgerätes und des Beatmungsbeutel, der Masken und der Larynxtuben.

Auffrischungstraining zur Modultasche NOM-NT499,

Preis 300,00 Euro netto zzgl. Anfahrtspauschale ( Sponsoring möglich, muss aber selbst organisiert werden )

# Übersicht Schulungskonzept „ notfallsichere Praxis “

## **Modul A : Basismodul ( 3 Stunden ) ( 5 Punkte )**

**Voraussetzung :** Nomeditec NOM-NT499 Notfalltasche fertig gefüllt

**Inhalt der Veranstaltung :** Einweisung in einem Basisnotfallseminar mit Simulationselementen zu den Themen alternativer Atemweg, Deeskalation, ABCDE-Vorgehensweise beim Notfall, Teamtraining, Risikomanagement, Fehlermanagement, Reanimation

## **Modul B : Erweiterung Medikamente ( 3 Stunden ) ( 5 Punkte )**

**Voraussetzung :** Nomeditec NOM-NT499 Notfalltasche fertig gefüllt  
Ampullarium mit Medikamenten bestückt, Kurs 1

**Inhalt :** Simulation verschiedener Notfälle zu den Themen Luftrnot, Bewußtseinsstörung, Koronarsyndrom, Anaphylaxie, gern auch individuelle Fälle auf Wunsch, Diskussion und ggf. Nachstellung komplizierter Fälle der Vergangenheit

## **Modul C : Erweiterung EKG ( 3 Stunden ) ( 5 Punkte )**

**Voraussetzung :** Nomeditec NOM-NT499 Notfalltasche fertig gefüllt  
Ampullarium mit Medikamenten bestückt, 1-Kanal-Notfall-EKG Schiller MS-3 oder vergleichbares mobiles EKG-Anzeigergerät aus Praxisbestand, Kurs 1 und 2

**Inhalt :** Simulation verschiedener Notfälle mit Wiederholung einzelner Szenarien aus Punkt 2 und Einbeziehung von bradykarden und tachykarden Rhythmusstörungen

## **Modul D : Erweiterung Defibrillation ( 3 Stunden ) ( 5 Punkte )**

**Voraussetzung :** Nomeditec NOM-NT499 Notfalltasche fertig gefüllt,  
Ampullarium mit Medikamenten bestückt, Fred Easyport automatischer externer Defibrillator-Monitor oder vergleichbarer AED aus Praxisbestand, Kurs 1 und 2,  
optional 1-Kanal-Notfall-EKG Schiller MS-3 und Kurs 3

**Inhalt :** Einweisung in Gerät Fred Easyport nach MPG,  
Inbetriebnahme des Gerätes, Indikationen und Durchführung der Defibrillation,  
Training komplexer Szenarien der Themengebiete Luftnot, Bewußtseinsstörung,  
Koronarsyndrom unter Einbeziehung von Reanimationselementen und  
Rhythmusstörungen

## **Modul E : Simulation in der Praxis, Leistungsüberprüfung ( 4 Stunden ) ( 5 Punkte )**



## **Modul A : Das Basismodul**

**Das Equipment :** Nomeditec NOM-NT499 Notfalltasche fertig gefüllt mit

- 4 Guedeltuben, 1 Magillzange, 1 Pulsoximeter, 1 Kleiderschere, 1 Beißkeil
- 1 HWS-Stütze, 1 Beatmungsbeutel mit Masken Gr. 3 und 5 , 1 Sauerstoffschlauch, 1 Flasche Einwegsauerstoff mit Druckminderer ( konstant 4 l/min ), 1 Sauerstoffmaske, 1 Verneblermaske, 1 Bakterienfilter
- Je 1 Larynxtube Gr. 4 und Gr. 5 mit Blockerspritze, 1 Pocketbeatmungsmaske mit Filtereinsatz
- 1 RR-Meßgerät, 1 Stethoskop, 1 BZ-Meßgerät, 1 Ohrthermometer, 1 schaumstoffgepolsterte Aluschiene, 1 Kanülenabwurfbehälter, 1 kompakter Notfallratgeber, 8 Paar Handschuehe, 1 Pupillenleuchte, 1 Reflexhammer
- 10 ml Spritzen, 1 leeres Ampullarium, 1 Nasaladapter, 1 Stauschlauch, ca. 20 Zellstofftupfer, 10 Kanülen, Hautdesinfektion, Pflasterrolle schmal, 3 Venenverweilkanülen mit Fixierpflaster, 1 Pinzette
- 500 ml NaCl, 250 ml NaCl, 1 Spyrke, 1 Infusionssystem
- 1 KFZ-Verbandset
- 1 Hygienekittel, 1 FFP3-Mundschutzmaske, 3 Sekretbeutel, 1 Hyperventilationsmaske, 4 Mullkompressen steril, 5 Mulltupfer steril, 1 Skalpell

**Das Seminar :**

- Vortrag : ca. 45 Minuten
  - o Risikomanagement,
  - o Teamaufteilung,
  - o Fehlerminimierung im Notfall,
  - o alternative Techniken der Atemwegssicherung und Medikamentengabe, Lagerungstechniken,
  - o Vorgehensweise nach ABCDE
  
- Simulation
  - o Vorstellung des Patientensimulators, Ersteinweisung
  - o Simulation Schweregrad 1 zum Kennenlernen des Phantomes
  - o Simulation des Schweregrades 4 zum Kennenlernen der Grenzen der Simulation
  - o Simulationen der Schweregrade 1 und 2 zum Vertiefen der Teamarbeit, einfacher Techniken der Lagerung, Atemwegssicherung und Deeskalation
  - o Simulation des Schweregrades 3 unter Einbeziehung der Elemente der Reanimation unter den Ausrüstungsbedingungen der Praxis
  - o Debriefing

## **Modul B : Erweiterungsmodul Medikamente**

### **Medikamentenempfehlung für Notfalltasche NOM-NT499**

- Schmerz : 10 mg Morphin, 2 x 1 g Metamizol, 2 x 75 mg Diclofenac, 1 x 500 mg ASS, ( 50 mg Ketanest S )
- Sedierung : 2 x 10 mg Diazepam, 1 x 5 mg Midazolam
- Hypertonie : 25 mg Ebrantil, 2 x 40 mg Furosemid, 1 Phiole Bayotensin, Nitrospray
- Gerinnung : 5000 IE Heparin
- Antiarrhythmika : 2 x 5 mg Verapamil oder 2 x 50 mg Ajmalin, 300 mg Amiodaron, ( 100 mg Xylocitin )
- Diabetes : 4 x 40 mval Glucose
- Luft : 200 mg Theophyllin oder Aminophyllin
- Allergie : 5 mg Dimeticon, 100 mg Prednisolon
- Reanimation : 3 x 1 mg Adrenalin, 2 x 0,5 mg Atropin

### **Das Seminar :**

- Vortrag : ca. 45 Minuten
  - Rechtliche Grundlagen
  - Indikationsstellung der Medikamentengabe unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Technik
  - Komplikationsmanagement
  - Leitliniengerechte Medikation bei Reanimation
- Simulation
  - Simulation des Schweregrades 2 , Thema: kardiologischer Notfall, Ziel auffrischen des Procedere der Arbeit im Team
  - Simulation des Schweregrades 3 , Thema : Luftnot , Ziel : Erkennen von Risikofaktoren, Deeskalation, Zwischenfallmanagement
  - Simulation Schweregrad 2 , Thema : Bewußtseinsstörung, Ziel : schnelle Diagnostik und Therapie
  - Simulation Schweregrad 3, Thema : Reanimation, Ziel : leitliniengerechte Koordination der medikamentösen Therapie, Überwachung der Qualität der Reanimation
  - Simulation Schweregrad 2 , Thema : Anaphylaxie, Ziel : leitliniengerechte Therapieplanung, Risikoeinschätzung und Abwägung komplikationsträchtiger Therapien
  - Debriefing

## **Modul C : Erweiterungsmodul EKG**

- Voraussetzung : Möglichkeit der mobilen EKG-Registrierung

### **Das Seminar :**

- Vortrag : ca. 45 Minuten
  - Rhythmusstörungen, deren Diagnostik und Differentialdiagnostik
  - Leitliniengerechte Therapie von Rhythmusstörungen
  - Komplikationsmanagement
- Simulation
  - Simulation des Schweregrades 2 , Thema: kardiologischer Notfall, Ziel auffrischen des Procedere nach ABCDE und der Arbeit im Team
  - Simulation des Schweregrades 3 , Thema : Luftnot , Ziel : Erkennen von Risikofaktoren, Deeskalation, Zwischenfallmanagement
  - Simulation Schweregrad 3, Thema : primäre Rhythmusstörung mit nachfolgender Reanimation, Ziel : leitliniengerechte Koordination der medikamentösen Therapie, Überwachung der Qualität der Reanimation
  - Simulation Schweregrad 4 , Thema : Luftnot , Ziel : Erkennen spezifischer Risikofaktoren, Differentialdiagnostische Erwägung der Therapieoptionen, leitliniengerechte Therapie
  - Simulation des Schweregrad 4 , Thema bradykarde Rhythmusstörung mit intermittierender Bewußtlosigkeit
  - Debriefing

Bei diesem Modul ist zu beachten , dass spezifische Therapieoptionen für die Arztpraxis nur Bedeutung haben, wenn die Möglichkeit einer automatischen oder manuellen Defibrillation gegeben ist.

## **Modul D : Erweiterungsmodul Defibrillation**

- Voraussetzung : Möglichkeit der mobilen EKG-Registrierung und mobilen manuellen Defibrillation / oder Automatischen externen Defibrillation

### **Das Seminar :**

- Vortrag : ca. 45 Minuten
  - Gerätetypen, Funktionsweise der Defibrillation
  - Manuelle und automatische Defibrillation, Vor- und Nachteile
  - Reanimationsbegleitende medikamentöse Therapie
  - Komplikationsmanagement
  
- Simulation
  - Simulation des Schweregrades 2 , Thema: kardiologischer Notfall, Ziel auffrischen des Procedere nach ABCDE und der Arbeit im Team
  - Simulation Schweregrad 3, Thema : primäre Rhythmusstörung mit nachfolgender Reanimation, Ziel : leitliniengerechte Koordination der medikamentösen Therapie, Überwachung der Qualität der Reanimation
  - Simulation Schweregrad 4 , Thema : Luftnot , Ziel : Erkennen spezifischer Risikofaktoren, Differentialdiagnostische Erwägung der Therapieoptionen, leitliniengerechte Therapie
  - Simulation des Schweregrad 4 , Thema tachykarde Rhythmusstörung mit intermittierender Bewußtlosigkeit
  - Debriefing

## **Modul E : Zertifikat**

**Teilnahme durch jede Praxis möglich durch Buchung des Modules. Zertifikat wird nur bei Erfüllung vorgefaßter Kriterien ( siehe unten ) ausgestellt. Zertifizierung und Prüfung in der jeweiligen bestellenden Praxis.**

### **Inhalt :**

10 Simulationsszenarien der Schwierigkeitsstufe 1 – 4 , mindestens 3 komplexe Simulationen aus den Themengebieten : kardialer Notfall, Luftnot und Bewußtseinsstörung, eine Simulation wird im 200 m- Radius und ausserhalb der Praxis stattfinden.

Voraussetzung :

- Nomeditec NOM-NT499 Notfalltasche fertig gefüllt oder Equipment aus Praxisbestand
- Ampullarium mit Medikamenten bestückt
- Fred Easyport automatischer externer Defibrillator-Monitor oder vergleichbarer AED aus Praxisbestand
- 1-Kanal-Notfall-EKG Schiller MS-3 oder vergleichbares mobiles EKG-Anzeigegerät aus Praxisbestand
- Für das Zertifikat sind erforderlich : mindestens 80% der maximal erreichbaren Punktzahl für alle 10 Simulationen, davon darf keine Simulation des Schweregrades 4 unter 70 % erfüllt sein.

Die Auswahl der Simulationsszenarien erfolgt aus mindestens 25 verfügbaren Simulationen durch ziehen eines Umschlages. Bewertet werden von einem unabhängigen Team Zeitmanagement, Risikomanagement, Erreichen des Simulationszieles, Teamarbeit, leitliniengerechte Therapie bzw. begründbare alternative Vorgehensweisen. Für die Bewertung gibtr es vorgegebene Kriterien.

### **Nach dem Training :**

Ausstellung einer Leistungsanalyse bei Nichterfüllung der Kriterien oder eines gerahmten Zertifikates für das Praxisteam.

Gültigkeit des Zertifikates : 1 Jahr

# Leitlinien der Reanimation

Prävention



Rechtzeitiges Erkennen einer Notfallsituation

Lebensgefahr ?

Bewußtsein?

Atmung ?


Frühes Erkennen  
Früher Notruf

**Notruf 112**

Arzt rufen

100 x / min.  
4-5 cm tief


Frühe  
Basisreanimation

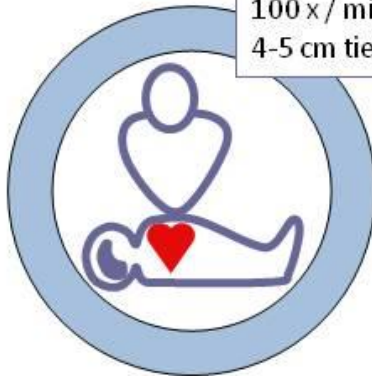

30 x Herzdruckmassage  
2x beatmen

5 Zyklen oder 2 min.  
dann DEFI wenn  
möglich, sonst weiter

Frühe  
Defibrillation

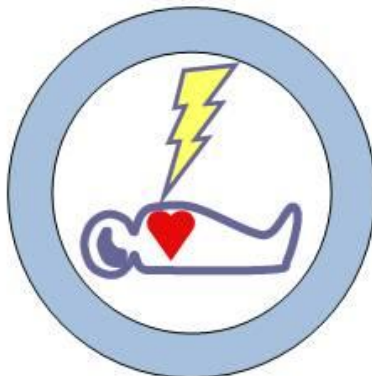

Wenn vorhanden  
Defibrillator vorbereiten

1x Defibrillation mit  
höchster Energie

30 x Herzdruckmassage  
2x beatmen

5 Zyklen oder 2 min.

Nur Praxen mit Möglichkeit der EKG-Registrierung !

Medikamentengabe erwägen

z.B. Adrenalin (Asy, Kammerfl.)

Atropin

Amiodaron (Kammerfl., ventr. Arrh.)

(Xylocitin) Ersatz f. Amiodaron



STAND Leitlinien  
der ERC 11/2005

Nur Übersicht !!!

Ein Service von [www.notfallseminar.de](http://www.notfallseminar.de)

Nomeditec Notfallmedizintechnik, 99094 Erfurt, Waidpfad 20, Phone : 01728221518,

Mail : [info@powermedpoint.com](mailto:info@powermedpoint.com), Web : [www.notfallseminar.de](http://www.notfallseminar.de),

Fax : 0361-2445023

# Nachbestellung Sauerstoff Einwegflasche 66 l

Bitte schicken Sie die verbrauchte Flasche komplett mit einem Sprechstundenbedarfsrezept an

Nomeditec

Notfallmedizintechnik

Waidpfad 20

99094 Erfurt

Dann erhalten Sie den Ersatz portofrei zugesandt.

## Hinweis :

Bitte frankieren Sie die Sendung ausreichend.

**Auf dem Sprechstundenbedarfsrezept  
vermerken Sie bitte Sauerstoff-füllung 66 Liter**

Alternativ können Sie mit beiliegendem Nachbestellschein auf eigene Rechnung per Fax bestellen .





# ABCDE-Basismodul für den Notfall

**Herzinfarkt Apoplex Luftnot Unfall Rea**

|   | Atemweg freimachen<br>Pulsoximetrie                         | Atemweg freimachen<br>Pulsoximetrie  | Atemweg freimachen<br>Pulsoximetrie  | Atemweg freimachen<br>freimachen<br>Pulsoximetrie HWS-<br>Stabilisation                          | Atemweg freimachen<br>Guedel  |
|---|---|--|--|--|---|
| <b>A</b><br>Atemweg                     | Sauerstoff  | Sauerstoff   | Sauerstoff   | Sauerstoff<br>Unfallstelle sichern<br>Bergung  | Herzdruckmassage<br>sicherer Atemweg<br>Beatmung<br><b>30/2</b><br>Frühdefibrillation |
| <b>B</b><br>Basismassnahmen             | Lagerung sitzend  | 30 Grad-Lagerung   | Lagerung sitzend   | Schocklagerung<br>Blutungsstopp  | keine HDM-Pausen<br>Kompressionstiefe<br>Kompressionsfrequenz<br>Helferwechsel        |
| <b>C</b><br>Cirkulation                 | Blutdruckmessung<br>Analgesiedierung                        | Blutdruckmessung<br>Temperatur<br>Blutzucker Neurologie                            | Blutdruckmessung<br>Temperatur<br>Sedierung<br>Blutzucker                  | Blutdruckmessung<br>Blutzucker<br>Analgesiedierung<br>Wärmeerhalt<br>Ruhigstellung<br>Neurologie | Rhythmusanalyse<br>Defibrillation   |
| <b>D</b><br>de-Eskalation<br>diagnostik |   |  |  |  |   |
| <b>E</b><br>erweiterte Massnahmen       | i.v.-Zugang<br>MONAC<br>Rhythmisierung Lyse<br>vs. Katheter | i.v.-Zugang<br>Infusion Blutdruck<br>einstellen Fieber<br>senken BZ<br>korrigieren | i.v.-Zugang<br>Flüssigkeit ?<br>Medikation ?<br>Temperatursenk. ?<br>Labor | i.v.Zugang<br>Volumengabe<br>Verbände<br>Bodycheck<br>Labor, EK                                  | Infusion i.v. oder i.o.<br>Medikamente<br>Labor                                       |

ein Gemeinschaftsprojekt von Powermedpoint Notfallweiterbildungen und Medical Point Praxisbedarf

# ABCDE-Basismodul für den Notfall

hypertensives

Anaphylaxie status epilepticus Lungenoedem

Asthma

Sepsis

|   | Atemweg freimachen<br>Pulsoximetrie<br>Verneblung | Beißkeil Pulsoximetrie                                  | Atemweg freimachen<br>Pulsoximetrie  | Atemweg freimachen<br>Pulsoximetrie<br>Verneblung   | Atemweg freimachen                                  |
|---|---|---|--|---|---|
| <b>A</b><br>Atemweg                     | Sauerstoff  | Sauerstoff  | Sauerstoff   | Sauerstoff  | Sauerstoff<br>Kühlung<br>(Nacken, Leisten)          |
| <b>B</b><br>Basistaßnahmen              | Schocklagerung                                    | liegend   | Lagerung sitzend   | sitzend   | halbsitzend oder<br>Schocklagerung                  |
| <b>C</b><br>Cirkulation                 | Blutdruckmessung<br>mehrfach<br>Sedierung erwägen | Blutdruckmessung<br>Temperatur<br>Blutzucker Neurologie | Blutdruckmessung   | Blutdruckmessung<br>Temperatur<br>Sedierung erwägen | Blutdruckmessung<br>Temperatur<br>Analgesedierung ? |
| <b>D</b><br>de-Eskalation<br>diagnostik | i.v.-Zugang<br>Medikamente                        | i.v.-Zugang<br>Infusion<br>Medikamente                  | i.v.-Zugang<br>Flüssigkeit ?<br>Medikation ?<br>Temperatursenk. ?<br>Labor | i.v.Zugang Volumen<br>Medikamente                   | Infusion i.v. oder i.o.<br>Flüssigkeit Medikamente  |
| <b>E</b><br>erweiterte Maßnahmen        |   |   |  |   |   |

ein Gemeinschaftsprojekt von Powermedpoint Notfallweiterbildungen und Medical Point Praxisbedarf

# Bestellschein

Preis, zzgl. MwSt.

Anzahl

|   |                   |  |                       |
|---|-------------------|--|-----------------------|
| <b>Pulsoximeter</b>                             | <b>75,00 Euro</b> |  |                       |
| <b>Larynx-tubus – Set Gr. 4 und 5 + Spritze</b> | <b>24,00 Euro</b> |  |                       |
| <b>Pocketbeatmungs-<br/>maske mit Filter</b>    | <b>8,50 Euro</b>  |  |                       |
| Bakterienfilter                                 | 2,50 Euro         |  |                       |
| Beatmungsbeutel m. Maske                        | 45,00 Euro        |  |                       |
| HWS-Stütze, verstellbar                         | 20,00 Euro        |  |                       |
| <b>Sauerstoff-Einweg 66 l</b>                   | <b>59,00 Euro</b> |  | SSB-Rezept            |
| Sauerstoffmaske                                 | 2,90 Euro         |  | Sauerstofffüllung 66l |
| Verneblermaske                                  | 3,50 Euro         |  |                       |
| RR-Meßgerät                                     | 22,00 Euro        |  |                       |
| Stethoskop, Flachkopf                           | 4,50 Euro         |  |                       |
| Thermometer ( Ohr- )                            | 45,00 Euro        |  |                       |
|   |                   |  |                       |
| Schaumstoffgepolsterte Aluschiene               | 10,00 Euro        |  |                       |
| <b>Kompakter Notfallratgeber</b>                | <b>17,50 Euro</b> |  |                       |
| <b>Nasalapplikator</b>                          | <b>9,50 Euro</b>  |  |                       |
| Ampullarium leer                                | 22,00 Euro        |  |                       |
| Venenverweilkanülen rosa                        | je. 1,50 Euro     |  |                       |
| Mini-Spyke-Entnahmesystem                       | 0,80 Euro         |  |                       |
| Sekret/Müllbeutel                               | je.0,80 Euro      |  |                       |
|   |                   |  |                       |
|   |                   |  |                       |

Preise netto zzgl. Porto 6,00 Euro

Nomeditec Notfallmedizintechnik, 99094 Erfurt,  
Waidpfad 20, Phone : 01728221518, Mail :  
info@powermedpoint.com, Web :  
www.notfallseminar.de,

**Fax : 0361-7894868**

Nomeditec Notfallmedizintechnik, 99094 Erfurt, Waidpfad 20, Phone : 01728221518,  
Mail : info@powermedpoint.com, Web : www.notfallseminar.de,

**Fax : 0361-2445023**

# Leitlinien der Reanimation

Prävention



Rechtzeitiges Erkennen einer Notfallsituation

Lebensgefahr ?

Bewußtsein?

Atmung ?

Frühes Erkennen

Früher Notruf


**Notruf 112**

Arzt rufen

100 x / min.  
4-5 cm tief

Frühe

Basisreanimation

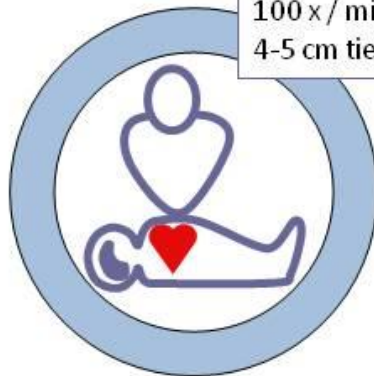


30 x Herzdruckmassage  
2x beatmen

5 Zyklen oder 2 min.  
dann DEFI wenn  
möglich, sonst weiter

Frühe

Defibrillation

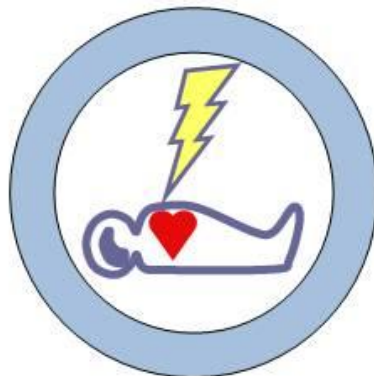

Wenn vorhanden  
Defibrillator vorbereiten

1x Defibrillation mit  
höchster Energie

30 x Herzdruckmassage  
2x beatmen

5 Zyklen oder 2 min.

Nur Praxen mit Möglichkeit der EKG-Registrierung !

Medikamentengabe erwägen

z.B. Adrenalin (Asy, Kammerfl.)

Atropin

Amiodaron (Kammerfl., ventr. Arrh.)

(Xylocitin) Ersatz f. Amiodaron



STAND Leitlinien  
der ERC 11/2005

Nur Übersicht !!!

Ein Service von [www.notfallseminar.de](http://www.notfallseminar.de)

Nomeditec Notfallmedizintechnik, 99094 Erfurt, Waidpfad 20, Phone : 01728221518,

Mail : [info@powermedpoint.com](mailto:info@powermedpoint.com), Web : [www.notfallseminar.de](http://www.notfallseminar.de),

Fax : 0361-2445023